

【お知らせ】オプチクリック®の『ディスプレイ表示』について

オプチクリック®は、患者様がご使用を開始してから通常約3年間ご使用いただくことができます。しかし、3年に至る途中で、ディスプレイに電池マークが点滅または点灯する、もしくは何も表示されないという事象の報告を2005年1月から本年9月末までに約1,200件受けております。この事象の原因について現在調査中でございます。


この事象を患者様からお聞きになられた場合には、製品に封入されている取扱説明書および患者様用に配布しております操作マニュアル「オプチクリック®の正しい使い方」の、「こんなときには…トラブル時の対処法【ディスプレイの表示】」の項に記載されていますように、速やかに新しいオプチクリック®と交換いただくよう、患者様へのご指導を宜しくお願い申し上げます。

ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


耐用年数(使用開始後約3年)に至るまでにディスプレイ表示に次のような事象が発生した場合には、**すぐに新しいオプチクリック®と交換いただくよう患者様にご指導ください**

単位設定ダイヤルを押し込んだあとにスタートボタンを押しても…


「電池マーク」が
約5秒間点滅する

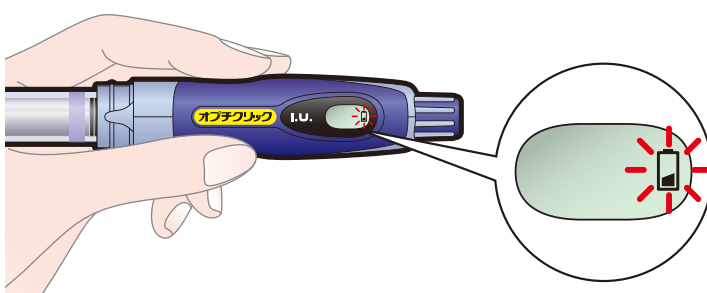

「電池マーク」が
2分間点灯する

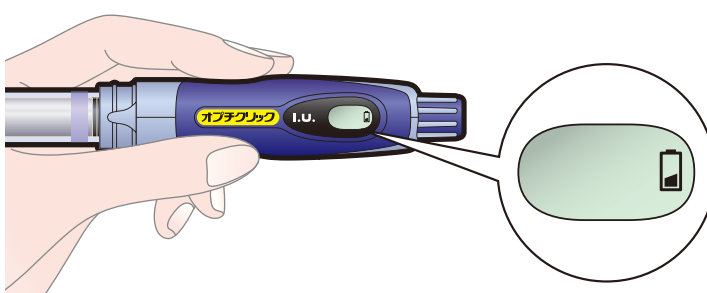

なにも
表示されない

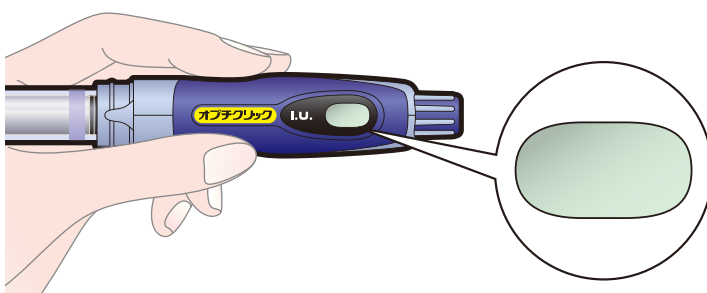

【 お問い合わせ先: サノフィ・アベンティス株式会社 オプチコール24 】

 **0120-49-7010**